


SZYBKA INSTRUKCJA WPROWADZAJĄCA

DIAGNOSTIC® GOLD SYSTEM


ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI

Niniejsza instrukcja pomoże Ci ustawić i przygotować glukometr do przeprowadzenia badań. Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja Użycia dołączona do zestawu Diagnostic Gold System.

1. OPIS GLUKOMETRU

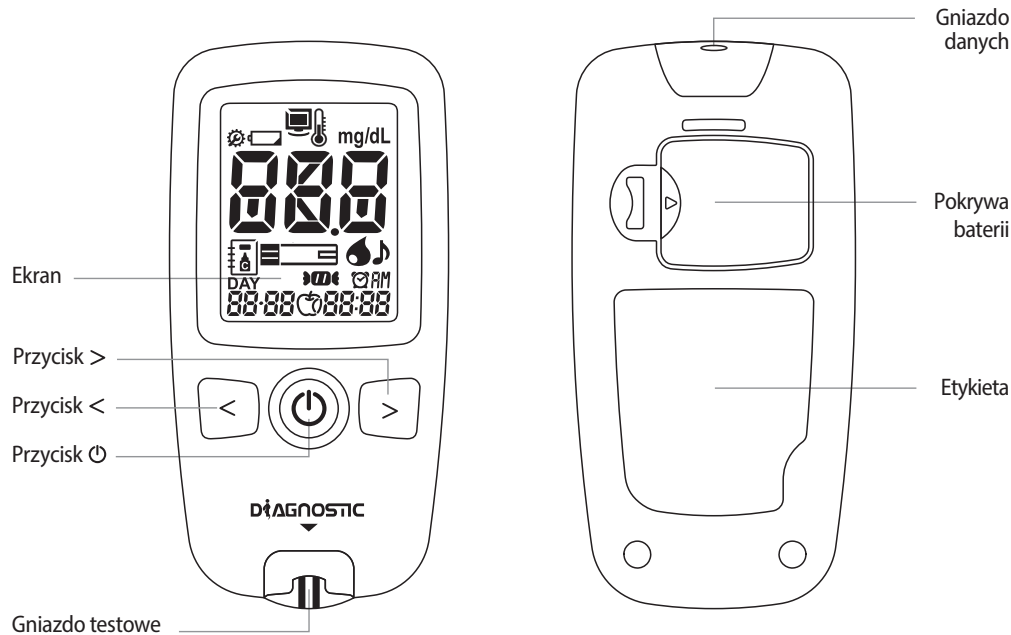

2. URUCHOMIENIE GLUKOMETRU

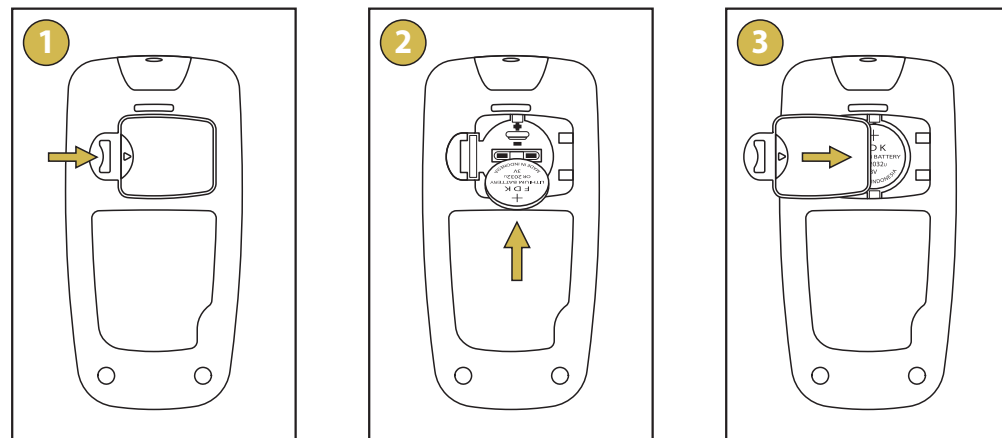


1 Otwórz pokrywę baterii, przesuwając do przodu wgłębienie w pokrywie.

2 Włóż baterię oznaczeniem „+” do góry.

3 Wsuń pokrywę baterii z powrotem.


3. USTAWIENIE DATY I GODZINY

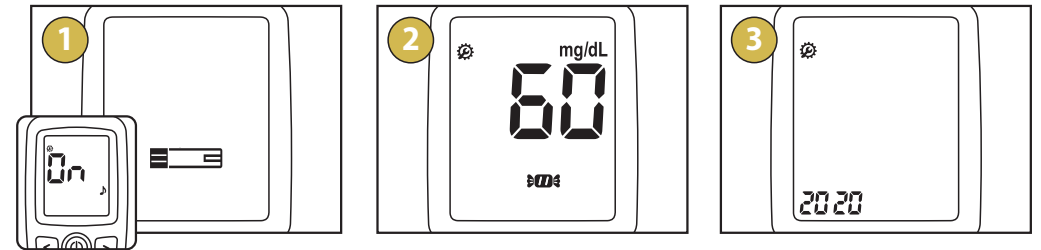


1 Włącz glukometr, wciskając Ⓟ, a następnie przytrzymaj Ⓟ przez 3 sek. Włącz (ON) lub wyłącz (OFF) sygnał dźwiękowy przy użyciu przycisków > lub <. Zatwierdź wybór przyciskiem Ⓟ.

2 Ustaw ostrzeżenie o hipoglikemii spośród wartości 60,70,80 mg/dL lub wyłącz je (OFF) wciskając > lub <. Zatwierdź wybór przyciskiem Ⓟ.


3 Ustaw rok, wciskając > lub <. Zatwierdź wybór przyciskiem Ⓟ.

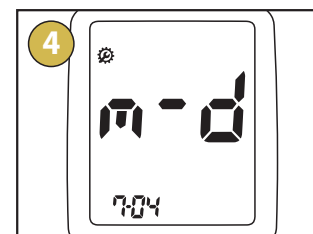

4 Ustaw format miesiąc - dzień (m-d) lub dzień - miesiąc (d-m), wciskając > lub <. Zatwierdź wybór przyciskiem Ⓟ.

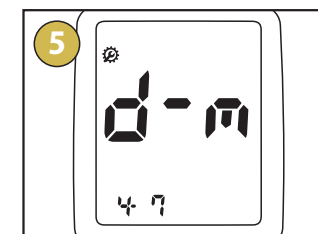


5 Ustaw miesiąc, wciskając > lub <. Zatwierdź Ⓟ. Ustaw dzień, wciskając > lub <. Zatwierdź Ⓟ.

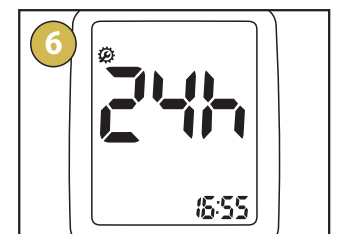


6 Wybierz format czasu wciskając > lub <. Zatwierdź Ⓟ. Następnie ustaw godzinę, wciskając > lub <. Zatwierdź Ⓟ.


4. PRZYGOTOWANIE NAKŁUWACZA

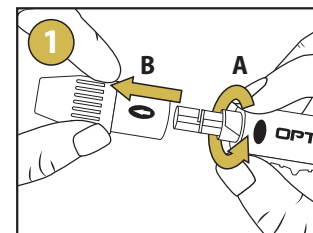


1 Przekręć i ściągnij nasadkę nakłuwacza.

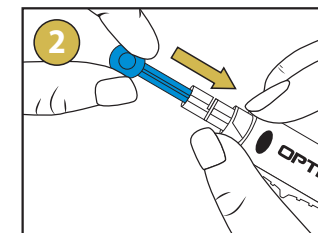


2 Umieść stabilnie lancet w nośniku.

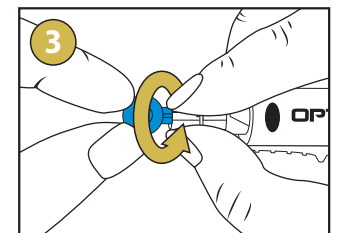


3 Ściągnij końcówkę ochronną lancetu.

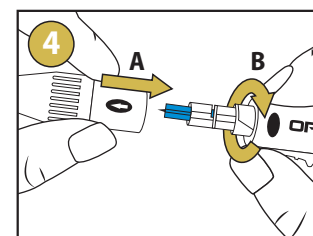

4 Nałóż nasadkę nakłuwacza i dokręć ją.

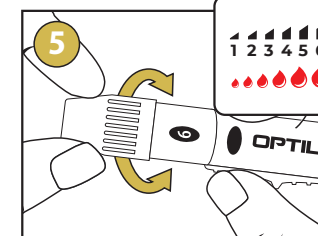


5 Ustaw głębokość nakłucia skóry, obracając przezroczystą końcówką.

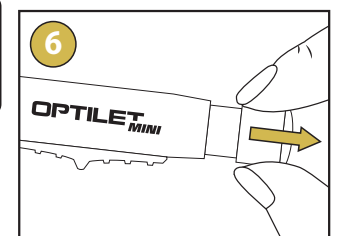


6 Odciągnij ruchomą tuleję, aż usłyszysz kliknięcie.


5. PRZEPROWADZENIE BADANIA

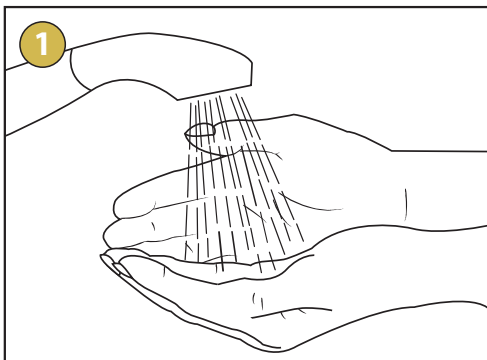


1 Przed przystąpieniem do pomiaru umyj ręce wyłącznie wodą z mydłem, a następnie osusz.

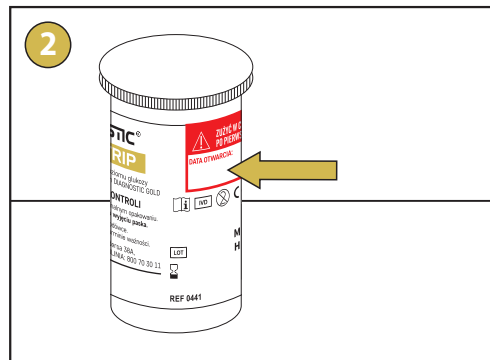



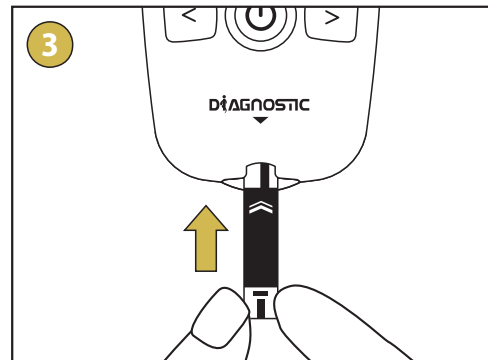


2 Zapisz datę pierwszego otwarcia pojemnika. Wyjmij pasek testowy i zamknij szczelnie opakowanie.

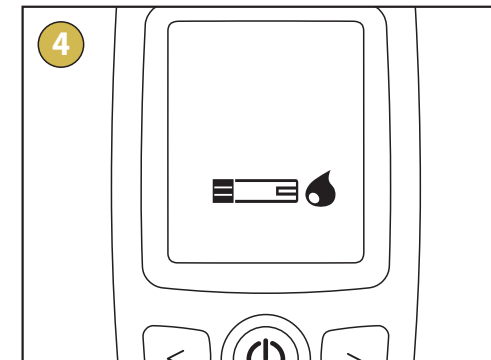


3 Włóż pasek testowy do glukometru




4 Migający symbol  oznacza, że urządzenie jest gotowe na próbkę krwi. Wciśnij jedno lub dwukrotnie , aby wybrać pomiar przed posiłkiem  lub po posiłku .

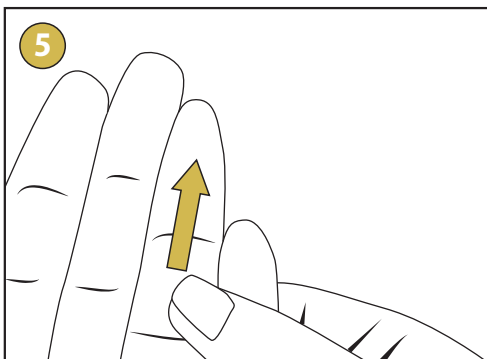


5 Rozmasuj energicznie miejsce pobrania krwi.

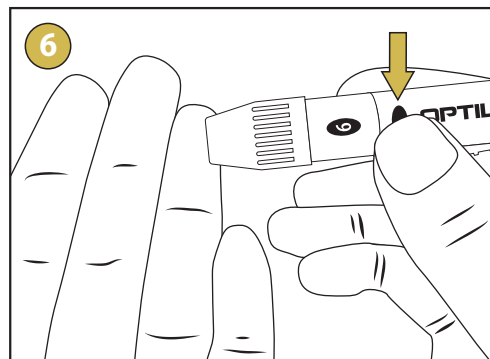


6 Przyłóż mocno nakłuwacz i wciśnij przycisk zwalniający. Kliknięcie oznacza, że nakłucie zostało wykonane.

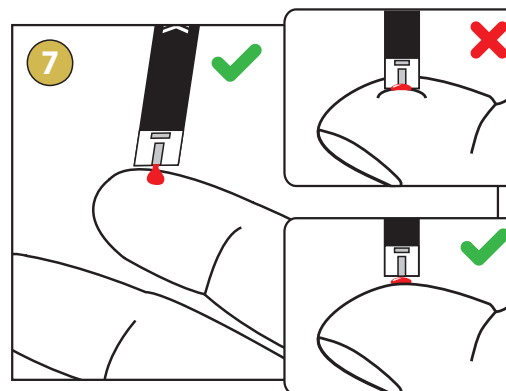


7 Przyłóż końcówkę paska testowego do kropli krwi, która zostanie automatycznie zassana.

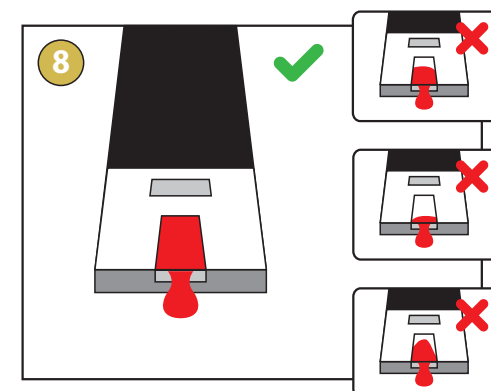


8 Upewnij się, że obwód okienka potwierdzenia jest całkowicie wypełniony krwią.

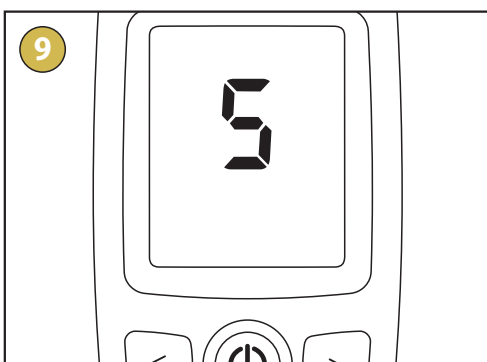

9 Gdy okienko paska testowego zostanie wypełnione krwią, urządzenie rozpocznie odliczanie od 5 do 1

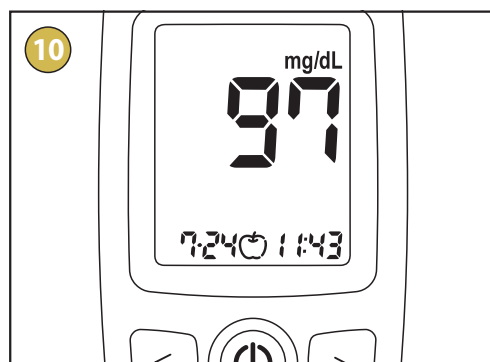

10 Glukometr wyświetli wynik pomiaru, który zostanie automatycznie zapisany w pamięci.

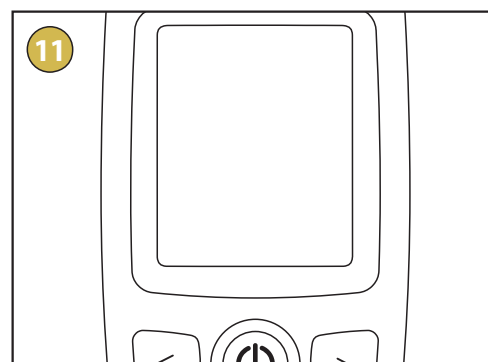

11 Glukometr wyłączy się automatycznie po wyjęciu paska testowego.

INFOLINIA

CZYNNA:
Poniedziałek - piątek

W GODZINACH:
8.00 - 16.00

800 70 30 11
dla telefonów stacjonarnych
połączenie bezpłatne

+48 85 874 69 28
dla telefonów komórkowych
(koszt połączenia ponosi
dzwoniący zgodnie z taryfą
operatora)

Diagnosis S.A.,
ul. Gen. W. Andersa 38A,
15-113 Białystok, Polska
www.diagnosis.pl



Rev. 2021.03.10 v1