


# Instrukcja parowania urządzeń w systemie Windows

## 1. Ustawienia Bluetooth


Na komputerze wyszukaj **ustawienia Bluetooth**:

- wpisując w wyszukiwarce:

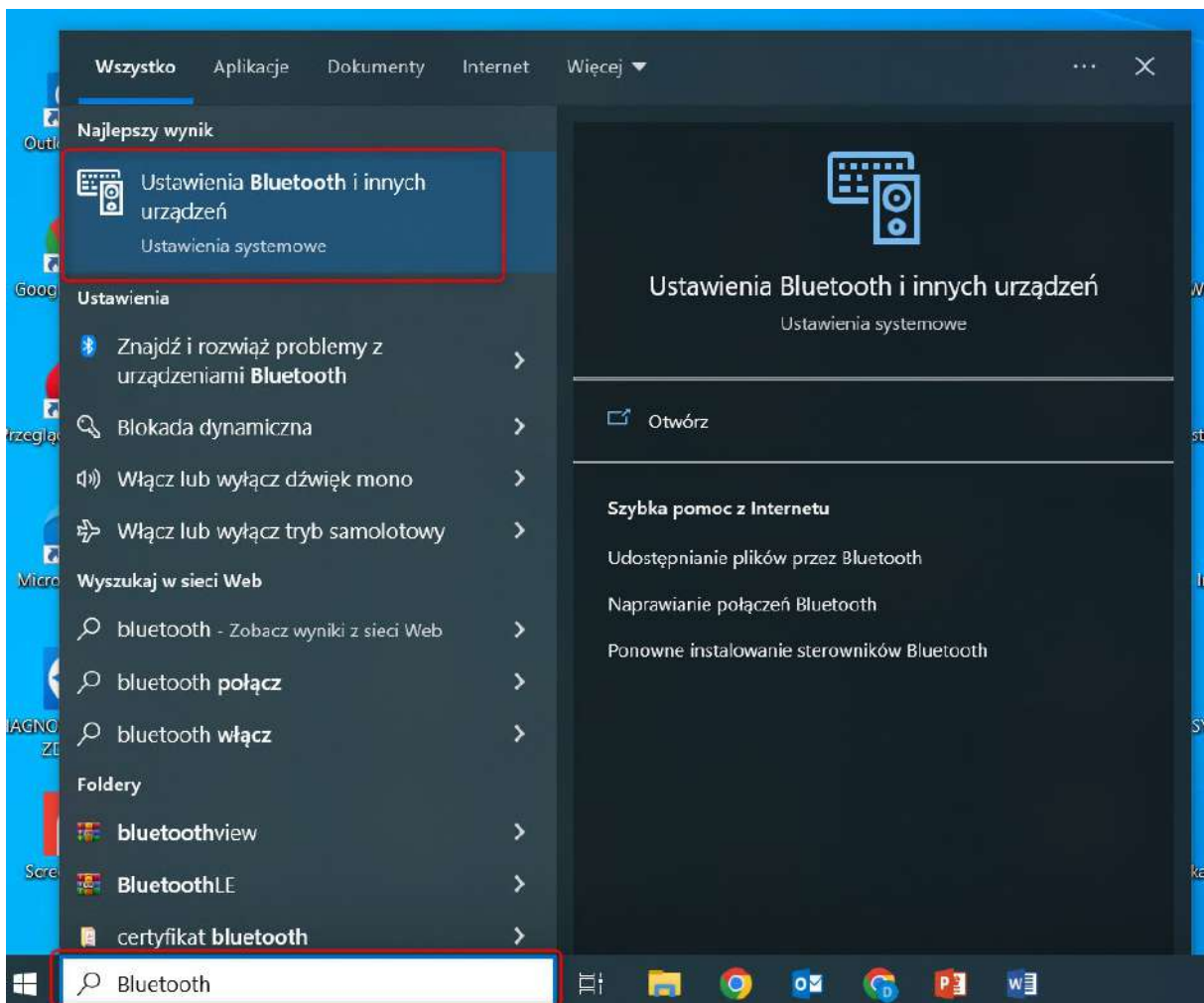


lub klikając na ikonkę Bluetooth


- wybierz: Dodaj urządzenie z obsługą funkcji Bluetooth

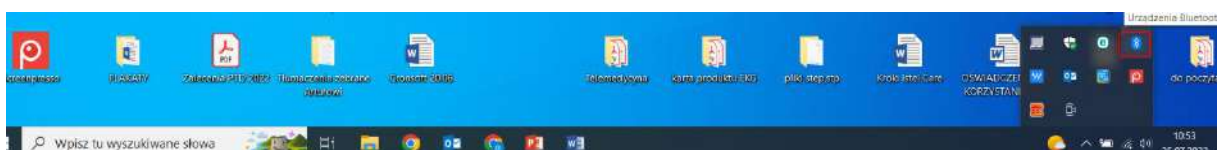


- Wybierz: Dodaj urządzenia Bluetooth i inne urządzenia

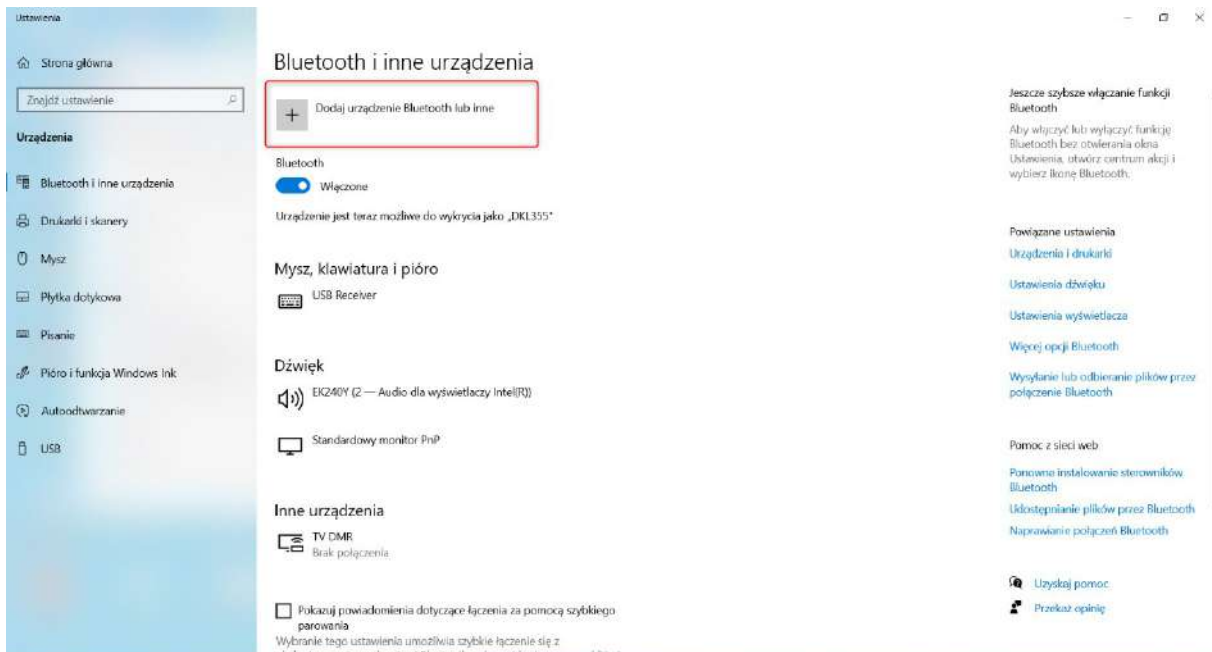

- Wybierz Bluetooth, w celu dodania urządzenia. Upewnij się, że urządzenie jest włączone (anализator, glukometry):

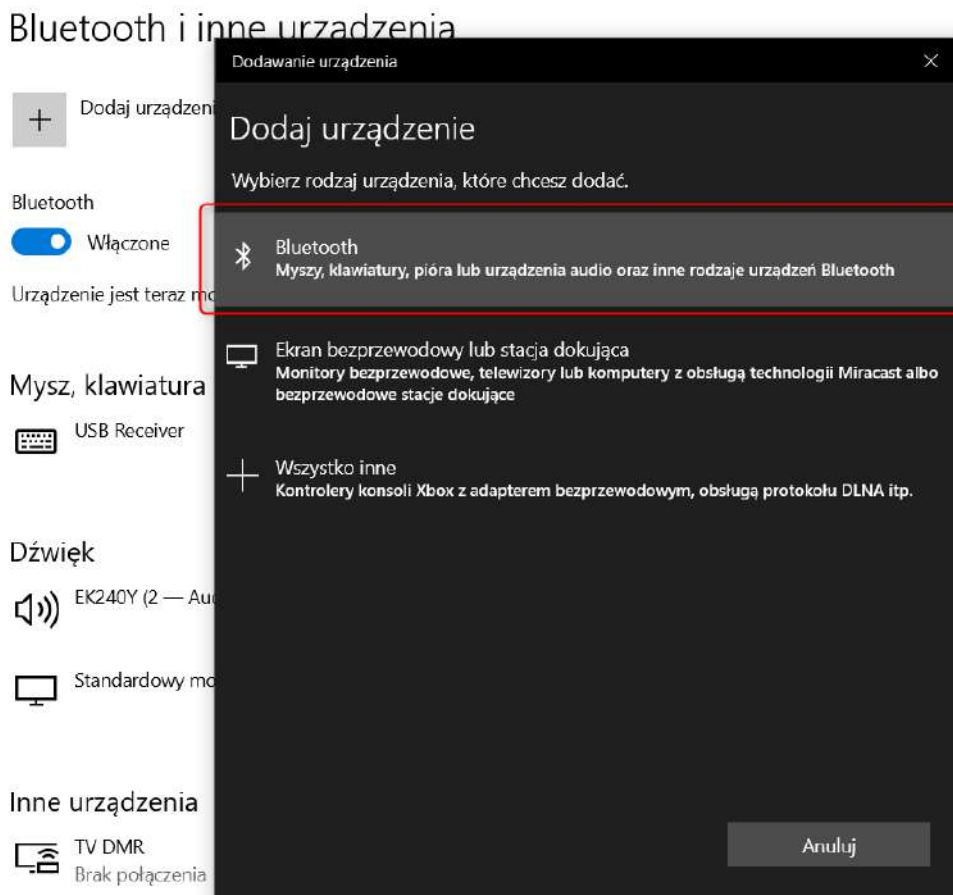



Wybierz urządzenie, które chcesz sparować z komputerem.

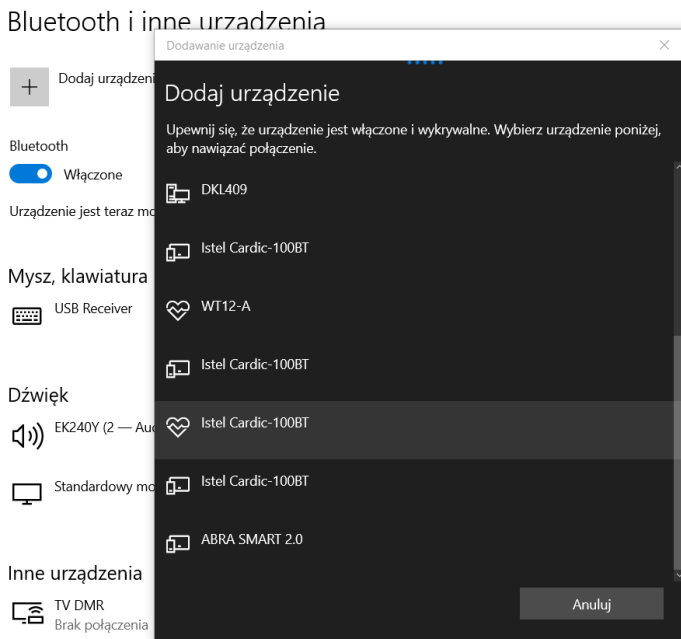


## 2. Parowanie glukometru: ABRA SMART BT, ABRA PRO, Diagnostic GOLD CARE

Po wybraniu glukometrów, należy wpisać kod pin potrzebny do sparowania z komputerem. Znajduje się on na etykiecie z tyłu glukometru. Jest to 6 ostatnich cyfr z numeru seryjnego SN, znajdujące się w ramce.

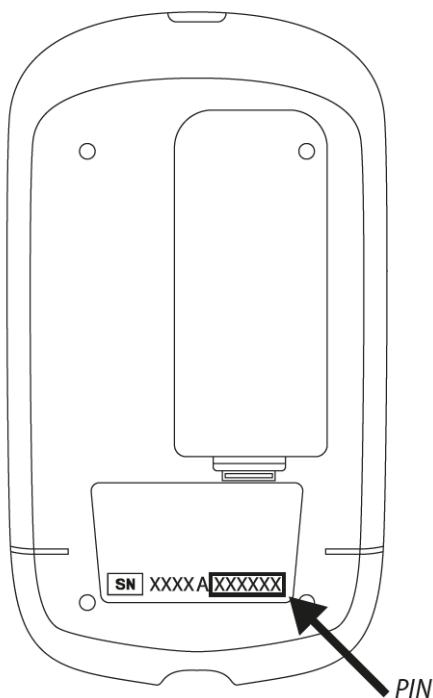


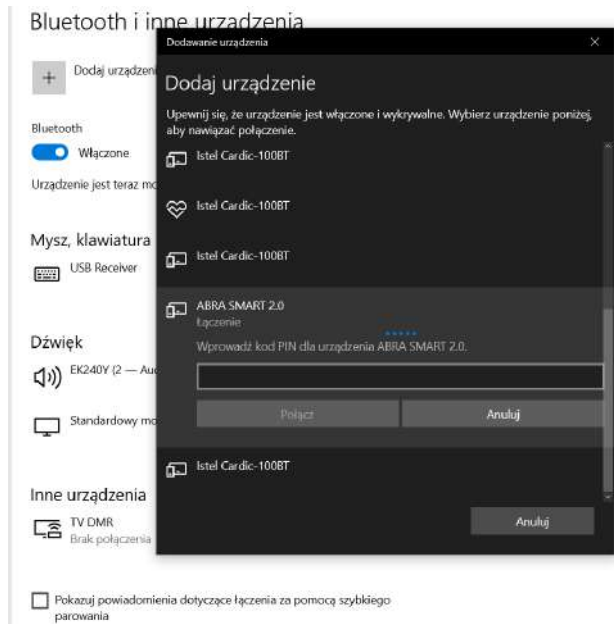

Wpisz kod PIN i kliknij POŁACZ.

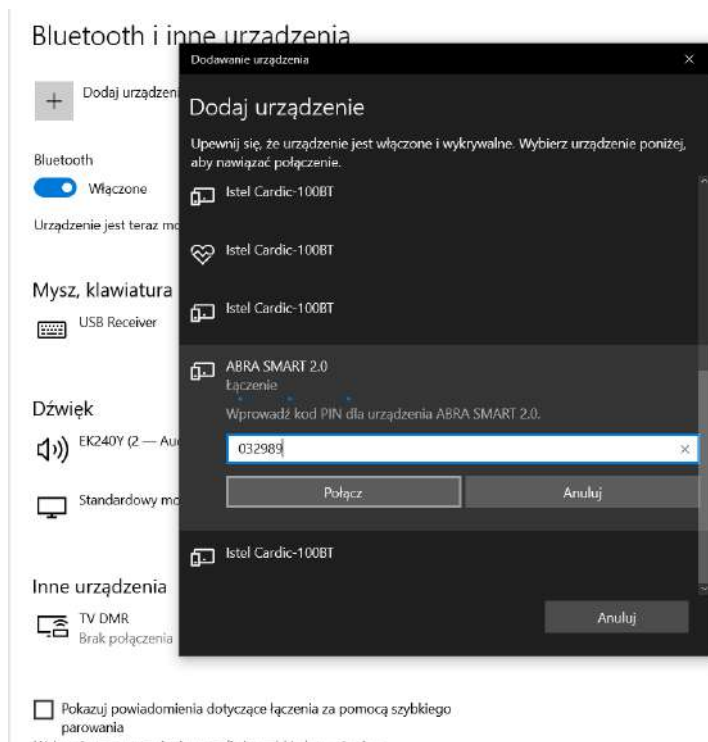

Urządzenie jest gotowe do wykonywania pomiarów w systemie Istel Care.

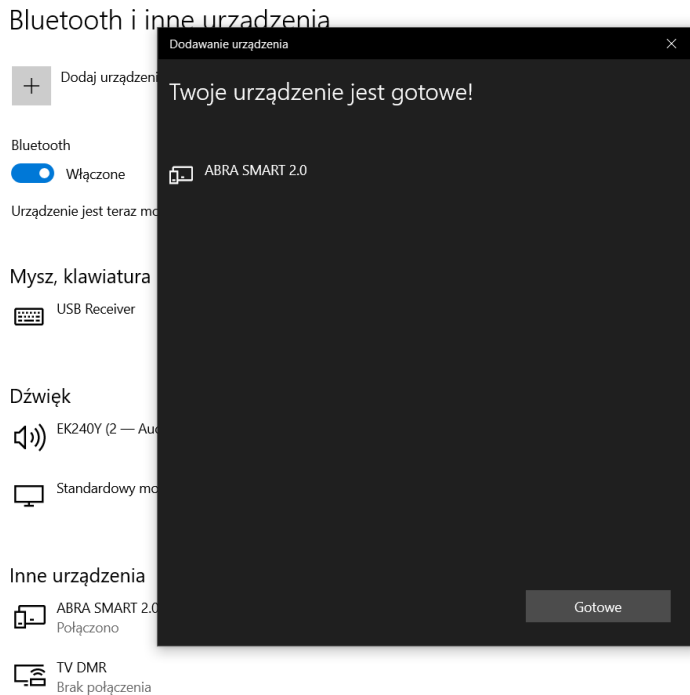


### 3. Parowanie ciśnieniomierza Cardic-100 BT

Przy parowaniu należy wpisać kod PIN z ciśnieniomierza:




Kod PIN wyświetlisz na ciśnieniomierzu, przytrzymując przycisk przez ok 4 sek., ikona zacznie migać, następnie przejdź przez ustawienia, klikając 7 krotnie przycisk . Na ekranie ciśnieniomierza wyświetlony zostanie 6 cyfrowy kod PIN.

Po wybraniu ciśnieniomierza na liście urządzeń z Bluetooth, wpisz kod PIN i kliknij POŁĄCZ.

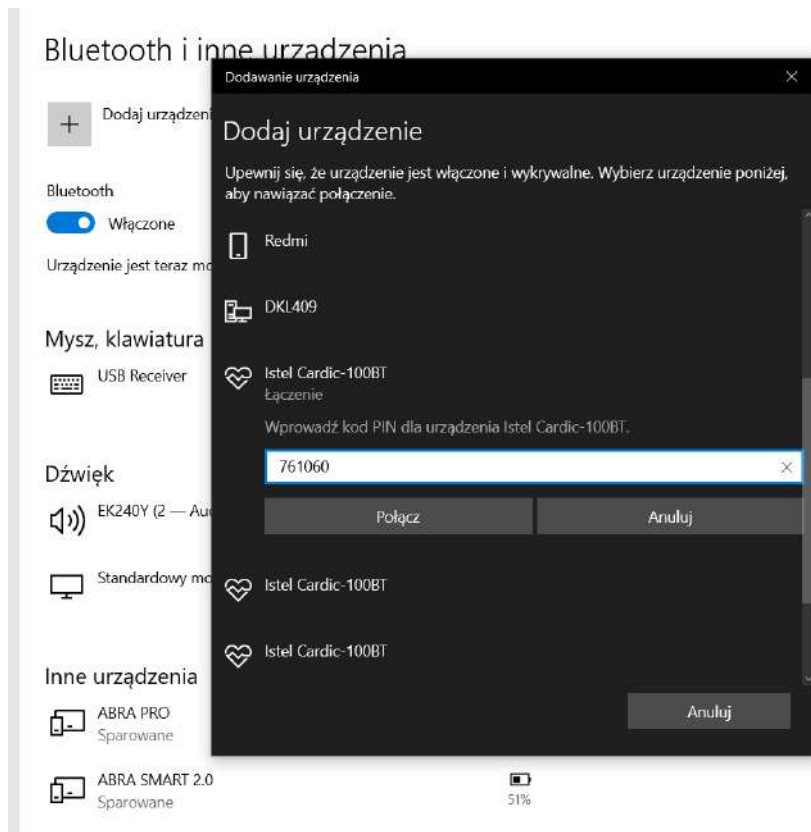


Urządzenie jest gotowe do wykonywania pomiarów w systemie Istel Care.

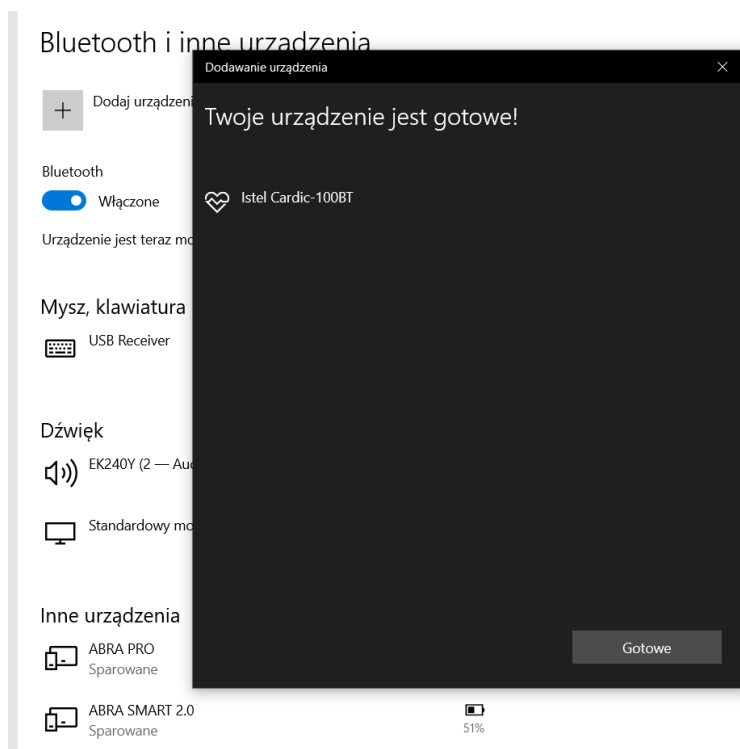


## 4. Parowanie analizatora składu ciała WA-200 BT

Włącz analizator i wybierz z listy urządzeń Bluetooth. Parowanie następuje bez wpisywania kodów PIN.

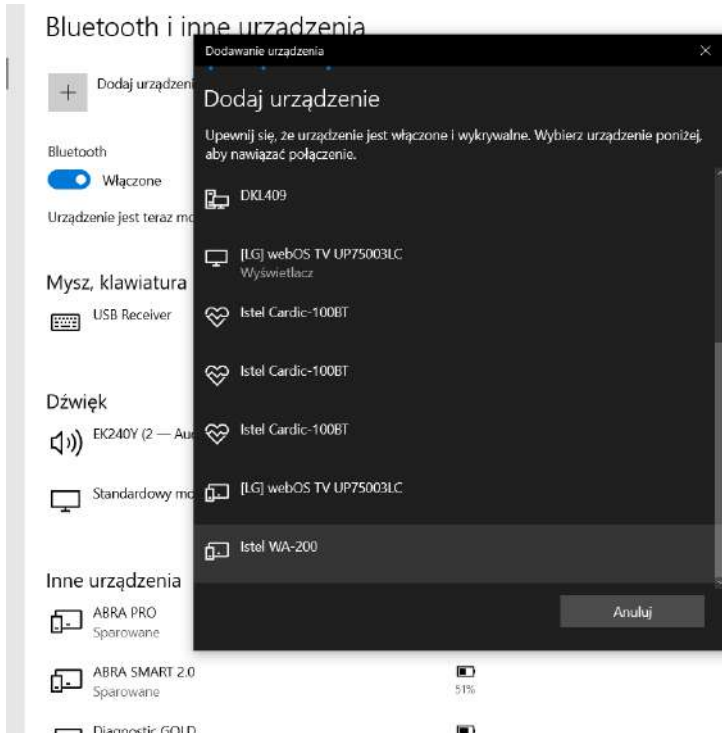


Urządzenie jest gotowe do wykonywania pomiarów w systemie Istel Care.

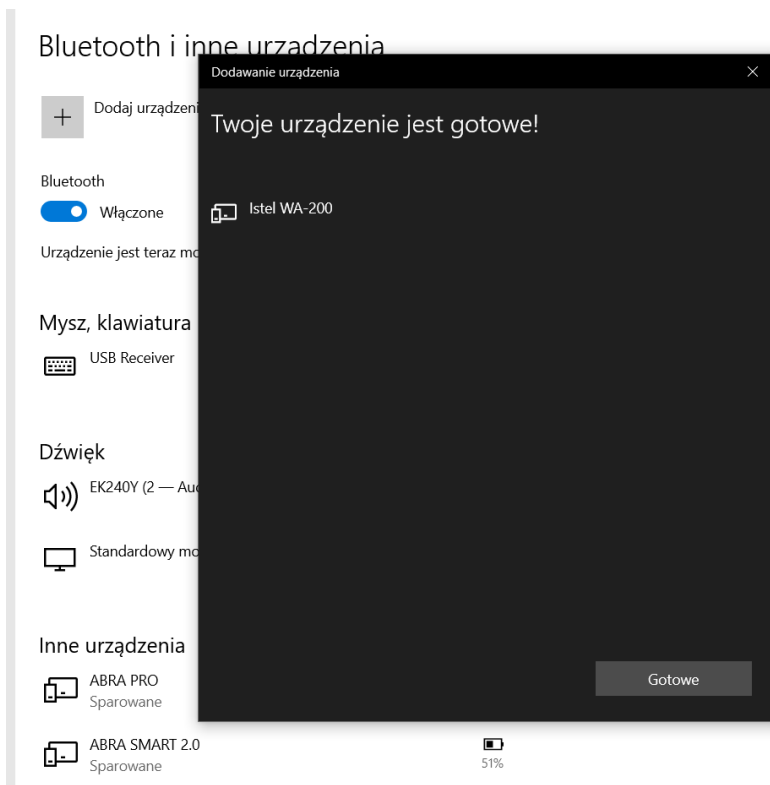

## 5. Sparowane urządzenia

Urządzenia sparowane z komputerem znajdziesz na liście: **inne urządzenia**.

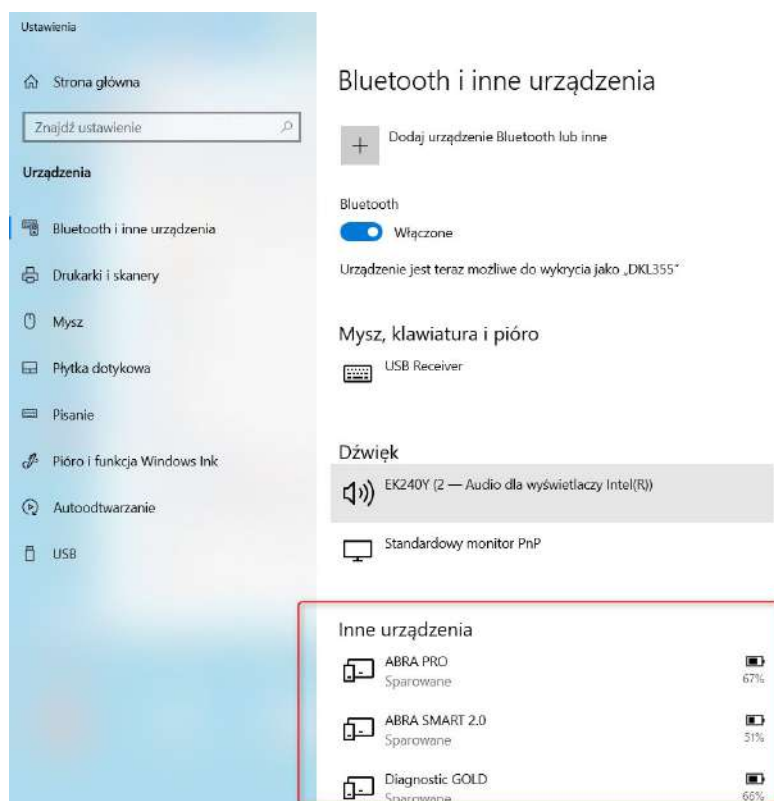

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: [istelcare@diagnosis.pl](mailto:istelcare@diagnosis.pl) lub 885 961 858 (pon-pt w godz. 8.00-16.00)

Diagnosis S.A.

Gen. W. Andersa 38A

15-113 Białystok, Polska

[www.diagnosis.pl](http://www.diagnosis.pl)