



# Instrukcja wykonywania pomiarów

## 1. Wstęp

Po zalogowaniu do profilu. Wybierz kafelek PACJENCI lub WYSZUKAJ PACJENTA.

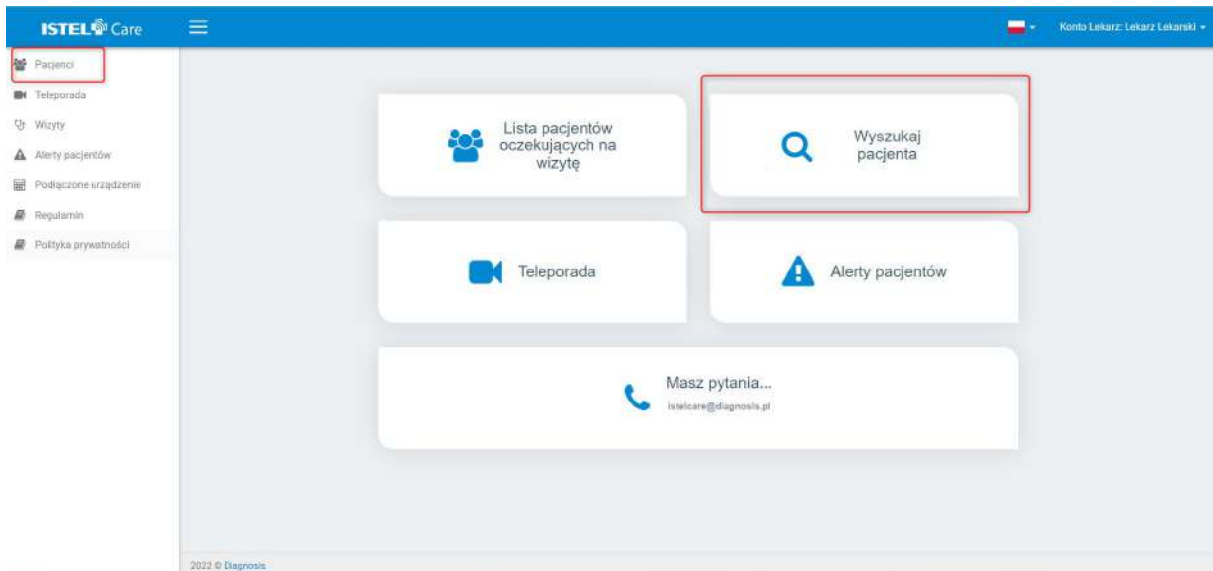

Wybierz pacjenta z listy, któremu chcesz wykonać pomiary.

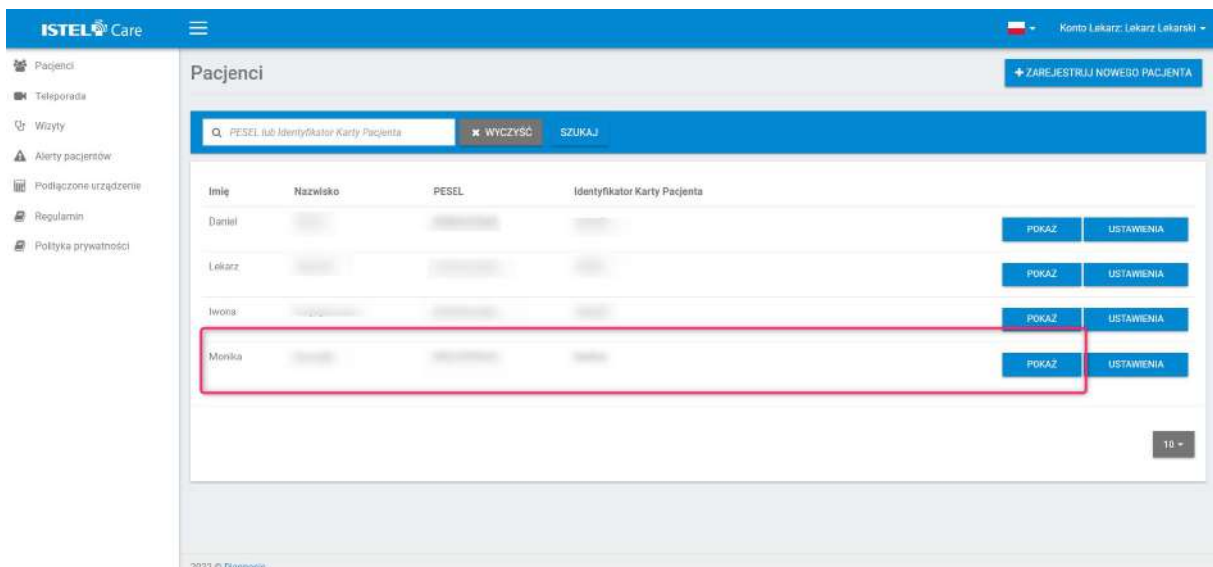

Na karcie pacjenta wybierz LISTA WIZYT, a następnie OTWÓRZ NOWĄ WIZYTĘ.

Pacjenci - Karta pacjenta

Monika  
Kobieta

Identyfikator: PESEL: [redacted]

Dane kontaktowe: +48 [redacted]

Glukoza Ciepłota ciała Ciężar ciała Ciężar ciała Temperatura EKG Bilans Lista wizyt

TELEPORADA OTWÓRZ NOWĄ WIZYTĘ

Rozpoczęcie	Zakończenie	Pomiary wprowadzone przez	Lekarz prowadzący	Typ Wizyty	
25.07.2022 10:47	11:00			Wizyta	SZCZEGÓŁY
22.07.2022 15:50	16:00	Lekarz Lekarski	Lekarz Lekarski	Wizyta	SZCZEGÓŁY
22.07.2022 15:25	15:45	Lekarz Lekarski	Lekarz Lekarski	Wizyta	SZCZEGÓŁY
22.07.2022 08:26	09:00	Lekarz Lekarski	Lekarz Lekarski	Wizyta	SZCZEGÓŁY
20.07.2022 10:01	11:00	Lekarz Lekarski	Lekarz Lekarski	Wizyta	SZCZEGÓŁY
19.07.2022 11:43	12:00			Wizyta	SZCZEGÓŁY

Pod przyciskiem **POBIERZ INSTRUKCJĘ**, możesz pobrać 2 instrukcję:

- parowanie urządzeń w systemie (pierwszy krok)
- wykonywanie pomiarów (drugi krok)

Pacjenci - Karta pacjenta

Monika  
Kobieta

Identyfikator: PESEL: [redacted]

Dane kontaktowe: +48 [redacted]

Glukoza Ciepłota ciała Ciężar ciała Ciężar ciała Temperatura EKG Bilans Lista wizyt

<< POWRÓT NA LISTĘ WIZYT

PRZYPIŚC LEKARZA POBIERZ INSTRUKCJE

Autozapis (2022.07.25 12:38:54) ZAMKNIJ WIZYTĘ

1 Parowanie urządzeń w systemie

2 Wykonywanie pomiarów

Waga (kg) 165 WYKONAJ POMIAR

HbA1c (%) Temperatura (°C)

Glukoza

Wynik (mg/dL) Oznaczenie pomiaru WYKONAJ POMIAR

Notatki wewnętrzne (widoczne tylko dla lekarza i personelu)

Pozostała 512 znaków

Po połączeniu urządzeń w systemie (pierwszy krok), możesz przejść do wykonywania pomiarów.

## 2. Wykonywanie pomiaru

W zależności od rodzaju pomiaru, kliknij na WYKONAJ POMIAR przy Glukozie, Ciśnieniu krwi bądź Wadze.

The screenshot shows the IStel Care interface for a patient record. At the top, there are buttons for 'PRZYPIŚZ LEKARZA' and 'POBIERZ INSTRUKCJE'. Below these are input fields for 'Waga (kg)', 'Wzrost (cm)' (with a value of 165), and 'BMI'. A 'WYKONAJ POMIAR' button is highlighted with a red box next to the BMI field. Other sections include 'HbA1c (%)', 'Temperatura (°C)', 'Glukoza' with a 'WYKONAJ POMIAR' button next to the 'Oznaczenie pomiaru' dropdown (set to 'Nieoznaczony'), and 'Ciśnienie' with a 'WYKONAJ POMIAR' button next to the 'Rozkurczowe (DIA) (mmHg)' field. There is also a 'Puls (bpm)' field and a 'Nieregularny puls' toggle switch.

### Wykonanie pomiaru: Analizatorem składu ciała WA-200 BT

Przed wykonaniem pomiaru, pacjent powinien mieć uzupełniony w rubryce wzrost.

Włącz urządzenie i wybierz POŁĄCZ w celu nawiązania połączenia z urządzeniem.

The screenshot shows a dialog box titled 'Pomiar wagi'. It contains the text: 'Aby wykonać pomiar wybierz urządzenie z listy urządzeń i kliknij przycisk "POŁĄCZ". Urządzenie musi być sparowane w systemie, a interfejs Bluetooth włączony.' Below this is a table with two columns: 'Model' and 'Identyfikator'. The table lists one device: 'Istel WA-200' with the identifier 'C5:C0:D3:7A:B1:01'. A green 'POŁĄCZ' button is highlighted with a red box next to the device entry. There is also an 'ANULUJ' button at the bottom right of the dialog.

Po połączeniu możesz wybrać:


- ROZPOCZNIJ POMIAR, w celu dokonania pomiaru masy ciała
- ROZPOCZNIJ PEŁNĄ ANALIZĘ, w celu wykonania pełnej analizy składu ciała (użytkownik powinien mieć białe stopy)



Po kliknięciu ROZPOCZNIJ POMIAR, automatycznie dokonywany zostanie pomiar masy ciała. Po wykonaniu pomiaru i kliknięciu OK, pomiary zostaną zapisane do wizyty.




Po kliknięciu ROZPOCZNIJ PEŁNĄ ANALIZĘ, w pierwszej kolejności wykonywany jest pomiar masy ciała, następnie obliczana jest reszta parametrów (tkanka tłuszczowa, tkanka mięśniowa, masa kostna, zawartość wody, BMI). Po kliknięciu OK, pomiary zostaną zapisane do wizyty, a pełna analiza składu ciała, będzie widoczna na karcie pacjenta (po zamknięciu wizyty).

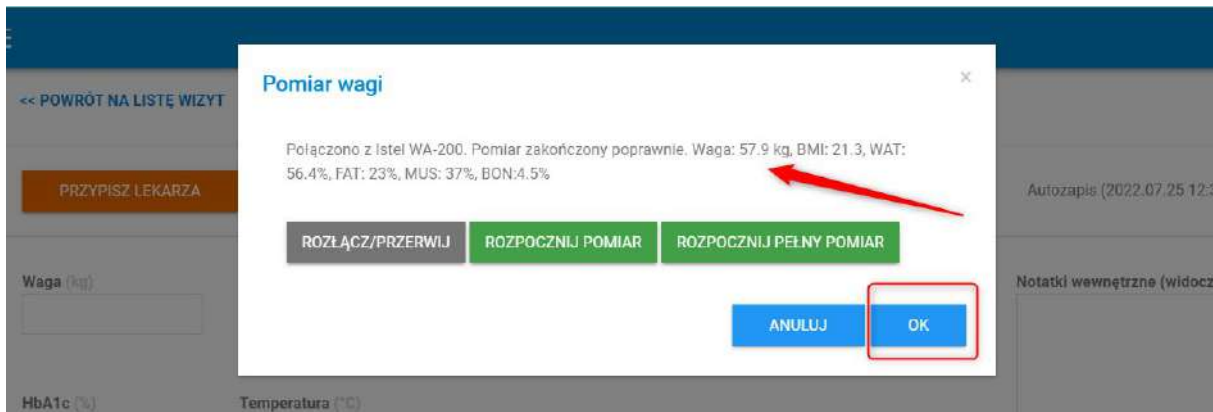


Po kliknięciu ROZŁĄCZ/PRZERWIJ zostanie przerwane połączenie bluetooth z urządzeniem.

## Wykonanie pomiaru: glukometrem ABARA SMART BT, ABRA PRO, DIAGNOSTIC GOLD CARE


Włącz urządzenie i Wybierz POŁĄCZ w celu nawiązania połączenia z urządzeniem.

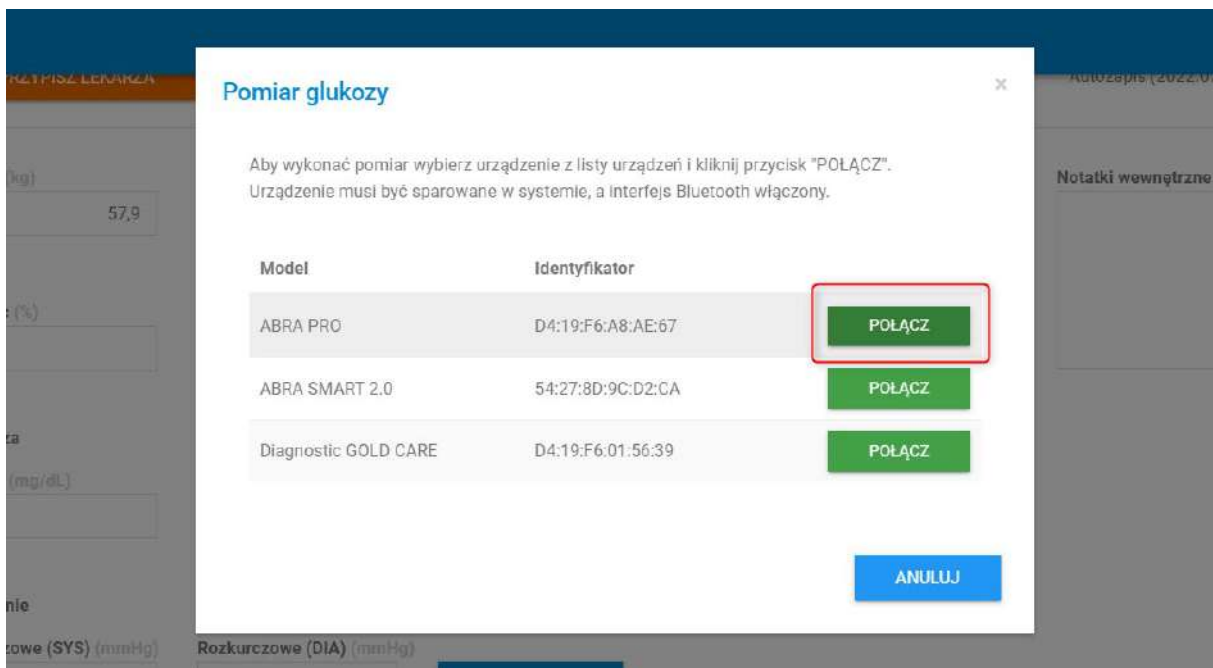

Po połączeniu, nałóż kroplę krwi na pasek testowy Abra (glukometr ABRA SMART BT, ABRA PRO) lub Diagnostic GOLD STRIP (Diagnostic GOLD CARE).

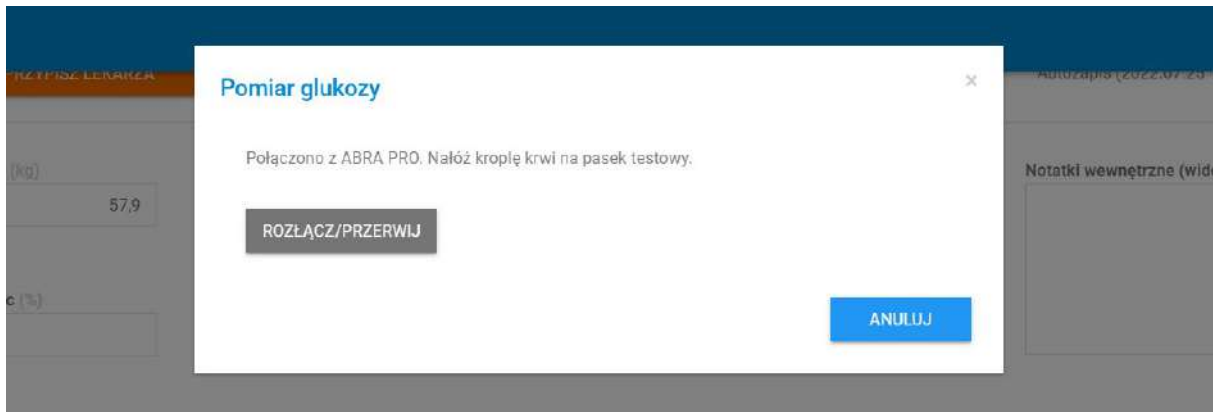


Po wykonaniu pomiaru, ustaw znacznik posiłku (naczczo, przed posiłkiem, po posiłku i nieoznakowany) – opcja dostępna w przypadku glukometrów mających możliwość ustawienia znacznika po wykonaniu pomiaru.

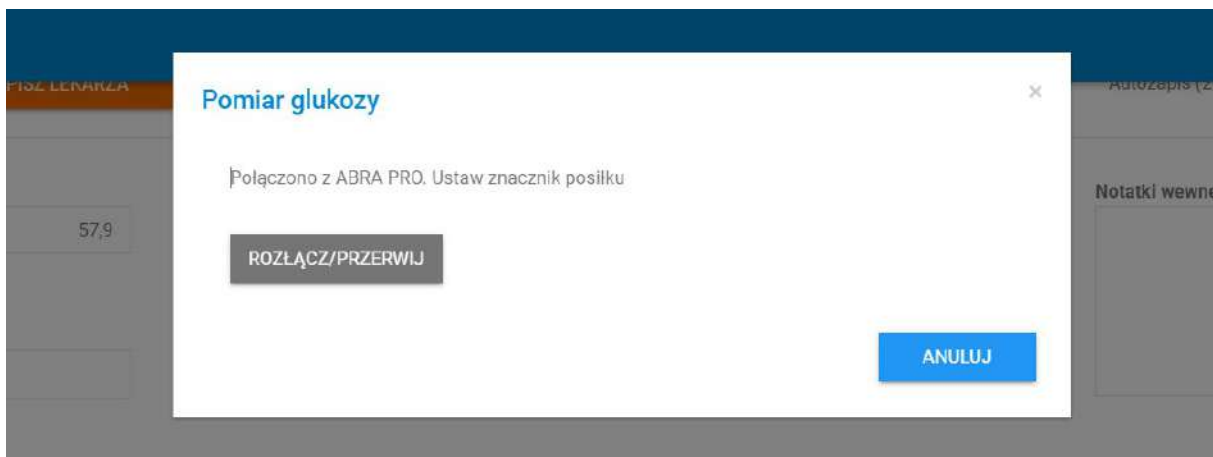


Wyświetlony zostanie wynik pomiaru. Po kliknięciu OK, pomiar zostanie zapisany do wizyty, a po jej zamknięciu będzie widoczny na karcie pacjenta.

Po kliknięciu ROZŁĄCZ/PRZERWIJ zostanie przerwane połączenie bluetooth z urządzeniem.

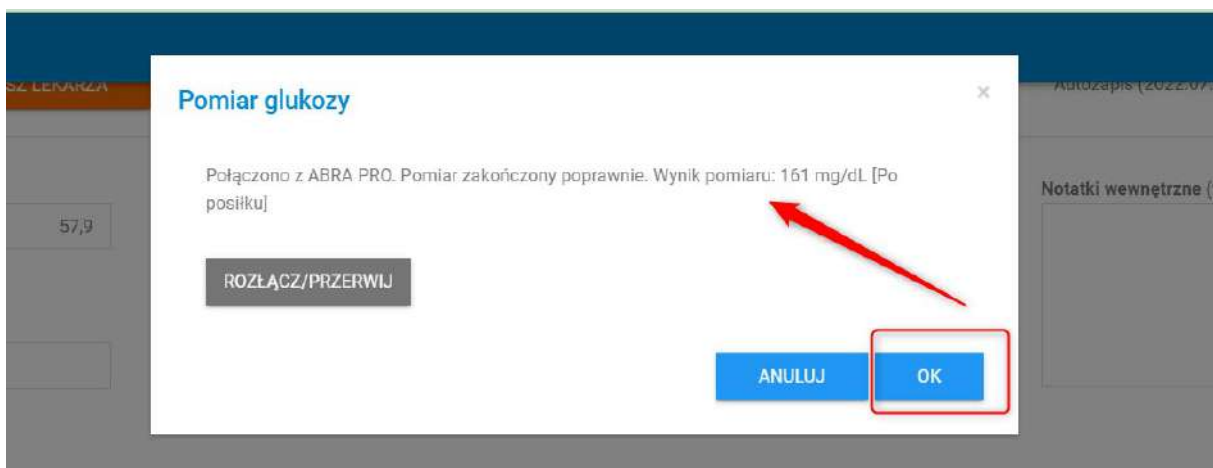


## Wykonanie pomiaru: ciśnieniomierzem CARDIC- 100 BT


Włącz urządzenie i wybierz POŁĄCZ w celu nawiązania połączenia z urządzeniem.

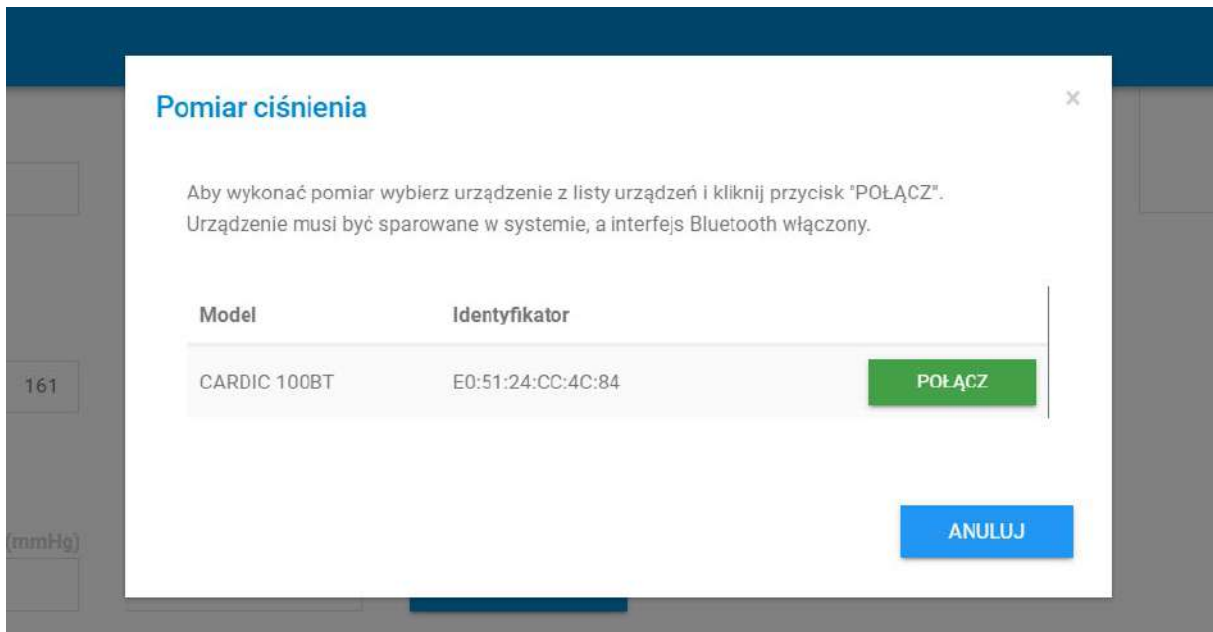


Po połączeniu, kliknij ROZPOCZNIJ POMIAR w celu wykonania badania.

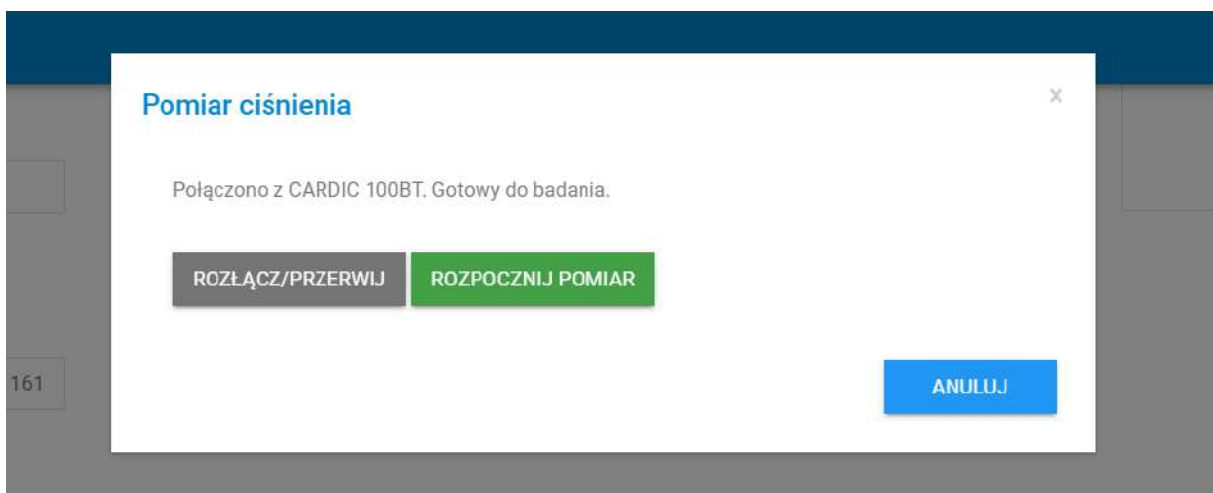

Rozpocznie się wykonywanie pomiaru.

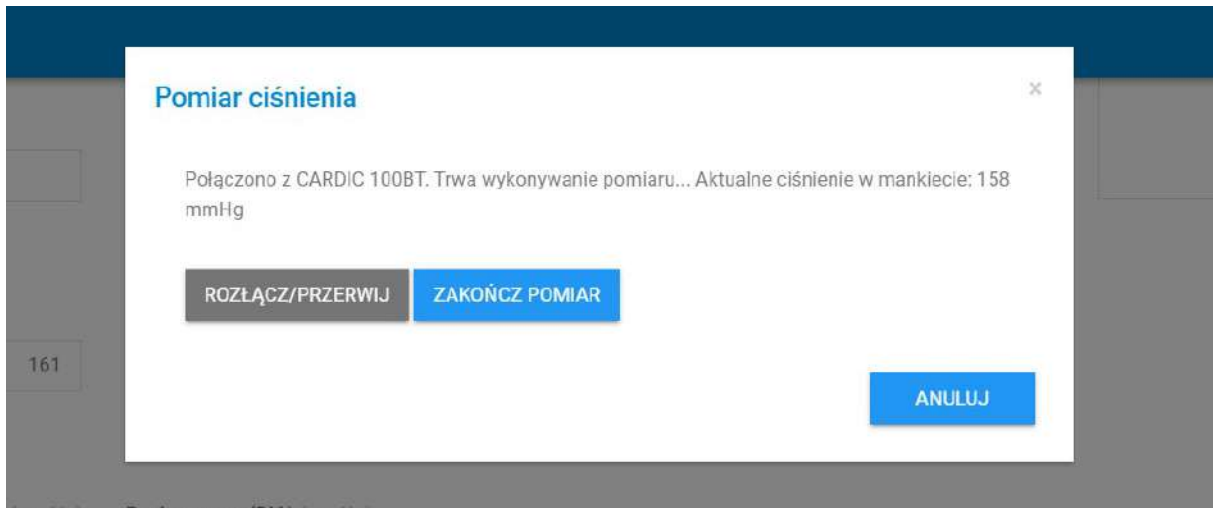

Po zakończeniu pomiaru, wyświetlony zostanie wynik. Po kliknięciu OK, pomiar zostanie zapisany do wizyty, a po jej zamknięciu będzie widoczny na karcie pacjenta.

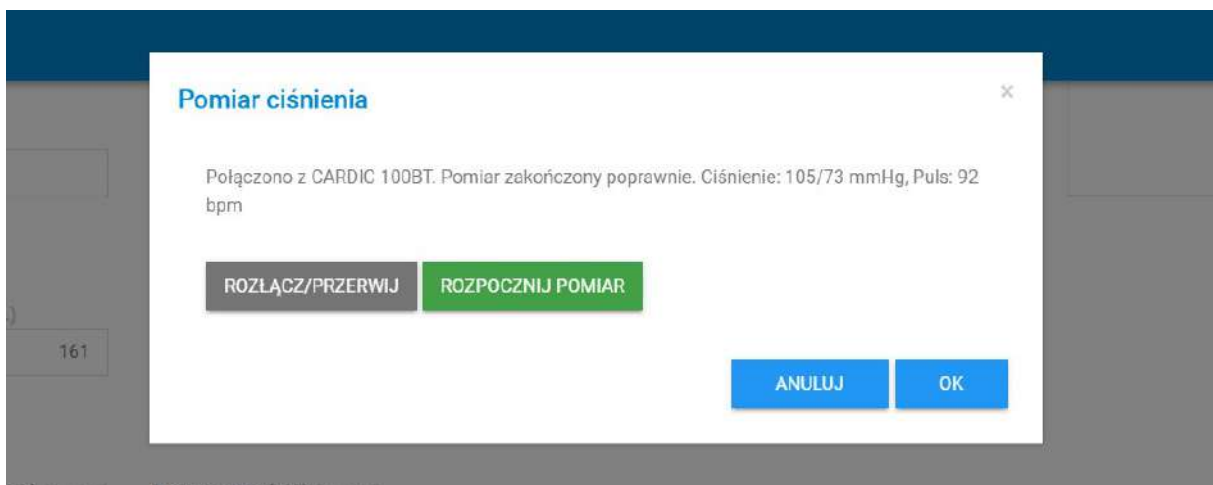

Po kliknięciu ROZŁĄCZ/PRZERWIJ zostanie przerwane połączenie bluetooth z urządzeniem.

**Pomiary z otwartej wizyty zostaną zapisane do karty pacjenta po jej zamknięciu.**

**Możesz wykonać pomiar ponownie w otwartej wizycie. Do wizyty będzie zapisywany ostatnio wykonany wynik.**

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: [istelcare@diagnosis.pl](mailto:istelcare@diagnosis.pl) lub 885 961 858 (pon-pt w godz. 8.00-16.00)